

この添付文書をよく読んでから使用してください

## 体外診断用医薬品

製造販売承認番号 20400AMZ01254000

クラス II 汎用・生化学検査用シリーズ  
ロイシニアミノペプチダーゼキット

## アクアオート カイノス LAP試薬

## 【一般的な注意】

- 1) 本製品は体外診断用医薬品です。これ以外の目的に使用しないでください。
- 2) 診断は他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて総合的に判断してください。
- 3) 添付文書に記載以外の使用方法については保証を致しません。
- 4) 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。詳細は機器メーカーにお問い合わせください。

## 【形状・構造等(キットの構成)】

- 1) 反応試液 (I) : (R-1)
- 2) 反応試液 (II) : (R-2)  
L-ロイシル-p-ニトロアニリド塩酸塩 (Leu-pNA)


## 【使用目的】

血清中のロイシニアミノペプチダーゼの測定

## 【測定原理】

## 1. 原理

血清中のロイシニアミノペプチダーゼ (LAP) は基質であるL-ロイシル-p-ニトロアニリド (Leu-pNA) に作用し、p-ニトロアニリンを生成します。波長415 nmでの吸光度の増加を測定することにより、LAP活性値を求めます。

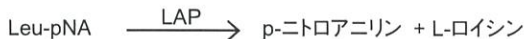

## 2. 特徴

- 1) L-ロイシル-4-ニトロアニリド基質法を用いた液状試薬です。

## 【操作上の注意】

## 1. 測定試料の性質、採取方法

- 1) 本製品による測定には、検体として血清を使用してください。
- 2) 新鮮な検体を使用してください。やむを得ない場合は密栓して凍結保存してください。血清中のLAPは室温保存で1日間、冷蔵保存で1週間、凍結保存で3ヵ月間安定です<sup>1)</sup>。

## 2. 妨害物質・妨害薬剤

- 1) アスコルビン酸 (100 mg/dLまで)、ビリルビン (50 mg/dLまで)、イントラリピッド (5%まで) は測定値に影響を与えません。
- 2) 高濃度ヘモグロビンは測定値に若干負の影響を与えます。
- 3) グルコース (1000 mg/dLまで)、尿酸 (20 mg/dLまで)、グルタチオン (20 mg/dLまで) は測定値に影響を与えません。

## 3. その他

- 1) 使用前に測定装置を十分洗浄した後、必ずキャリブレーション (プランク) を行ってください。
- 2) コントロール血清類は添加してあるLAPの由来によってヒト血清と反応性が異なる場合がありますので注意してください。


## \*\*【用法・用量(操作法)】

\*

## 1. 試薬の調製方法

- 反応試液 (I) : そのまま使用してください。  
反応試液 (II) : そのまま使用してください。

## 2. 標準的操作法

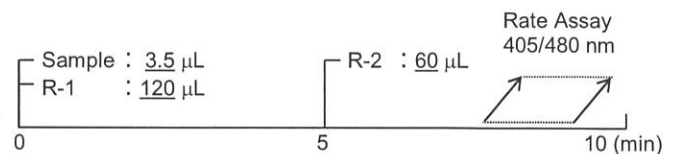

各種ディスクリット方式臨床化学自動分析装置に使用できます。  
装置ごとにパラメータを準備していますので、別途ご請求ください。

## 3. 濃度算出法

$$\text{LAP 活性値 (U/L)} = \frac{\Delta E \times \text{T.V.} \times 10^6}{\epsilon \times d \times \text{S.V.}}$$

$\Delta E$  : 1分間あたりの吸光度変化

T.V. : 総液量 (mL)

$\epsilon$  : 測定波長でのp-ニトロアニリンの分子吸光係数

d : セル層長 (cm)

S.V. : 血清量 (mL)

## 【測定結果の判定法】

1. 参考基準値<sup>2)</sup>

- 1) 血清中のLAP活性値 : 30~70 U/L

## 2. 判定上の注意

- 1) 基準範囲は様々な要因により変動することがありますので、あらかじめ各施設に適した基準範囲を設定してください。
- 2) 検体の濃度が測定範囲を超える場合は、検体を生理食塩液で希釈して再測定してください。
- 3) 検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査、又は他の検査方法により確認してください。

## \*\*【性能】

## 1. 性能

## 1) 感度

精製水を試料として操作するとき、1分間あたりの吸光度変化は、0.010以下。

## 2) 正確性

既知活性の管理用検体を測定するとき、既知活性の85~115%。

## 3) 同時再現性

管理用検体を5回同時測定するとき、吸光度変化のC.V.値は、10.0%以下。

## 4) 測定範囲 (標準的操作法)

0~2000 U/L

## 2. 相関性試験成績

- 1) 血清検体 (x: A社Leu-pNA法 y: 本製品)  
 例数 : n = 80  
 相関係数 : r = 1.000 回帰式 :  $y = 0.98x + 1.00$

## \*【使用上又は取扱い上の注意】

## 1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- 1) 血清等の検体はHIV、HBV、HCV等の感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。また、検体に接触した器具等は検体と同様、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。
- 2) 反応試液 (Ⅱ) は酸性ですので、取扱いには十分注意してください。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
- 3) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 4) 感染を避けるため、口によるピペティングを行わないでください。
- 5) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

## 2. 使用上の注意

- 1) 本製品は凍結を避け、貯蔵方法に従って保存してください。誤って凍結させた試薬は、品質が変化して正しい結果が得られないことがあるので使用しないでください。
- 2) 開封後の反応試液は、蓋をしめて2~8°Cで保存してください。開封後の有効期間は1ヵ月間です。
- 3) 反応試液は2種類ありますので、測定時に取り違えないようにしてください。
- 4) ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。
- 5) ロットが同じであっても試薬を継ぎ足して使用しないでください。

## 3. 廃棄上の注意

- 1) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の関連法規に従って処理してください。
- 2) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121°C、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- 3) 本製品が漏出又は飛散した場合は、少量のときは吸水紙等で拭き取り、大量のときは水で洗い流してください。
- 4) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。
- 5) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

## 【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 : 2~8°C
2. 有効期間 : 1年 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

## \*\*【包装単位】

| 製品名                     |          | 管理コード   | 包装                    |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------|
| アクアオート<br>カインス<br>LAP試薬 | 反応試液 (Ⅰ) | STF1361 | 60 mL×4               |
|                         | 反応試液 (Ⅱ) | STF1362 | 30 mL×4               |
|                         | 反応試液 (Ⅰ) | STL1360 | 36 mL } ×2<br>18 mL } |
|                         | 反応試液 (Ⅱ) |         |                       |

## 【主要文献】

- 1) 玄番昭夫 : Medical Technology, 13, 3:273-278 (1985)
- 2) 金井正光 : 臨床検査法提要, 33:547-549 (2010)

## 【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部  
 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18  
 ☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元



株式会社 カインス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485