

マルチキャリブレーター「カイノス」

注：この使用説明書をよく読んでから使用して下さい。

1. 製品内容

本製品は、CRE、UN、IP、Ca、Glu測定試薬用標準液です。

2. 特徴

- 1) 値付けの根拠が明確な検量用標準液です。
- 2) 調製不要の液状タイプです。
- 3) 複数項目含有のマルチキャリブレーターなので作業性がよく、かつ経済的です。
- 4) 検体とのサンプリング量誤差をなくすため、ヒト血清と同等の粘度に調製されています。

3. 試液の調製法

そのまま使用してください。

4. 使用上又は取扱い上の注意

- 1) サンプルカップ等に小分けし、ご使用ください。
- 2) 弊社測定用試薬以外への適用に際しては、試薬の検量線が原点を通り、表示濃度まで直線性があることを確認してください。
- 3) 本品は、極めてまれに結晶が析出することがあります。現時点では表示濃度への影響は見出されておりませんが、結晶が析出した場合には弊社までご一報頂きたくお願い致します。

5. 貯蔵方法・有効期間

貯蔵方法：2～10℃で冷暗所保存
有効期間：製造後18ヵ月間

6. 表示値

項目	CRE	UN	IP	Ca	Glu
表示値	5.0 mg/dL	30 mg/dL	10 mg/dL	10 mg/dL	200 mg/dL
不確かさ	± 0.04 mg/dL	± 0.2 mg/dL	—	± 0.3 mg/dL	± 1.4 mg/dL
対照標準物質	NIST	NIST	社内標準物質	NIST	NIST

7. 包装

管理コード	包装
CR-7220	5 mL × 2

製造販売元



株式会社 カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎03(3816)4485