



# HISCL<sup>®</sup> HBsAb キャリブレータ

\* 2008年4月改訂(第2版)  
2007年7月作成(第1版)

Cat. No. AY670302

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

## 【使用法】

- (1) 本品は HISCL HBsAb 試薬のキャリブレータとして使用してください。
- (2) HISCL HBsAb 試薬の添付文書に記載されている内容に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも調製済みですので、そのまま使用してください。  
HISCL HBsAb C0 ( 0 mIU/mL) 1mL×1本      HISCL HBsAb C2 ( 100 mIU/mL) 1mL×1本  
HISCL HBsAb C1 ( 10 mIU/mL) 1mL×1本      HISCL HBsAb C3 ( 1000 mIU/mL) 1mL×1本  
IU:WHO 標準品で使用されている単位
- (4) 本品は、サンプルカップに約 200  $\mu$ L (5 滴) 分注して使用してください。
- (5) 開封後の有効期間は 90 日です。

## 【校正用の基準物質(標準物質)】 WHO International Reference W1042

## 【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) 本品はウサギポリクローナル抗体を原料としており、ヒト由来成分は使用していません。
- (2) 各構成試薬はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際には、大量の水と共に流してください。また、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

## 【貯蔵方法・有効期間】

- \* 貯蔵方法:2~8℃に保存      有効期間:12 カ月(使用期限は、外箱に表示しています。)

HISCL はシスメックス株式会社の登録商標です。

製造販売元

株式会社日本凍結乾燥研究所

〒204-0022 東京都清瀬市松山3丁目1番5号

販売元

シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区臨浜海岸通1丁目5番1号 TEL (078)265-0500(代)