

Sysmex HISCL® FT4キャリブプレート

* 2008年7月改訂(第2版)
2007年2月作成(第1版)

Cat. No. 05423812

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

【使用法】

- (1) 本品はHISCL FT4試薬のキャリブプレートとして使用してください。
- (2) HISCL FT4試薬の添付文書に記載されている内容に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも調製済みですので、そのまま使用してください。

HISCL FT4 C0	1mL×1本	HISCL FT4 C3	1mL×1本
HISCL FT4 C1	1mL×1本	HISCL FT4 C4	1mL×1本
HISCL FT4 C2	1mL×1本	HISCL FT4 C5	1mL×1本
- (4) 本品は、サンプルカップに約200 μ L(5滴)分注して使用してください。
- (5) 開封後の有効期間は90日です。

【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) 本品の原料であるヒト血液由来成分は、HBs抗原、HCV抗体、HIV-1抗体及びHIV-2抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、感染の危険性を完全に否定できる検査法がありません。また、それ以外のウイルスに関する検査はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱いください。
- (2) 各構成試薬はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際には、大量の水と共に流してください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法: 2~8℃に保存

* 有効期間: 12カ月(使用期限は、外箱に表示しています。)

【表示値】

本ロットの表示値は、以下の通りです。使用する機器の取扱説明書に従って、正しく入力してください。

ロット Lot	ZS9001
使用期限 Expiry	2010-03
構成試薬 Components	表示値 Reference values
HISCL FT4 C0	0.00 ng/dL
HISCL FT4 C1	0.28 ng/dL
HISCL FT4 C2	0.69 ng/dL
HISCL FT4 C3	1.47 ng/dL
HISCL FT4 C4	2.85 ng/dL
HISCL FT4 C5	7.25 ng/dL

バーコード

Barcode



製造販売元

シスメックス株式会社

〒851-0073 神戸市中央区臨浜海岸通1丁目5番1号 TEL (078)285-0500(代)

在庫管理番号(54505097)

409306010D