

# Sysmex HISCL<sup>®</sup> HCV Ab キャリブレータ

2007年5月作成(第1版)

Cat. No. 05424818

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

## 【使用法】

- (1) 本品は HISCL HCV Ab 試薬のキャリブレータとして使用してください。
- (2) HISCL HCV Ab 試薬の添付文書に記載されている内容に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも調製済みですので、そのまま使用してください。  
HISCL HCV Ab NC (HCV 抗体陰性キャリブレータ) 1mL×1本  
HISCL HCV Ab PC (HCV 抗体陽性キャリブレータ) 1mL×1本
- (4) 本品は、サンプルカップに約 200 $\mu$ L(5 滴)分注して使用してください。
- (5) 開封後の有効期間は 90 日です。

## 【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) HISCL HCV Ab PC の原料であるヒト血液由来成分は、HBs 抗原、HIV-1 抗体及び HIV-2 抗体の検査を行い、陰性の結果を得ていますが、HCV 抗体については、陽性の結果が得られています。56 $^{\circ}$ C $\cdot$ 10 時間の加熱処理を行っていますが、感染の可能性を完全に否定できるものではありません。また、それ以外のウイルスに関する試験はしていません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に十分に注意して取扱いをしてください。
- (2) 各構成試薬はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際には、大量の水と共に流してください。また、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

## 【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法: 2~8 $^{\circ}$ C に保存

有効期間: 6 カ月 (使用期限は、外箱に表示しています。)

製造販売元

# シスメックス株式会社

〒851-0073 神戸市中央区臨浜海岸通1丁目5番1号 TEL (078)265-0500(代)

在庫管理番号(54502056)

409406006E