



HISCL CA19-9 キャリブレータ

* 2010年 3月作成(第2版)
2009年 10月作成(第1版)

Cat. No. AS579077

この使用説明書をよく読んでから使用してください。

【使用法】

- (1) 本品は HISCL CA19-9 試薬のキャリブレータとして使用してください。
- (2) HISCL CA19-9 試薬の添付文書に記載されている内容に従って操作してください。
- (3) 本品には、下記の構成試薬が含まれています。いずれも調製済みですので、そのまま使用してください。

HISCL CA19-9 C0 (0 U/mL) 1mL×1本	HISCL CA19-9 C3 (100 U/mL) 1mL×1本
HISCL CA19-9 C1 (10 U/mL) 1mL×1本	HISCL CA19-9 C4 (250 U/mL) 1mL×1本
HISCL CA19-9 C2 (40 U/mL) 1mL×1本	HISCL CA19-9 C5 (1000 U/mL) 1mL×1本
- (4) 本品は、サンプルカップに約 200 μ L(5 滴)分注して使用してください。
- (5) 開封後の有効期間は 90 日です。

【校正用の基準物質(標準物質)】 ヒト結腸腺癌培養細胞の培養上清から調製し、既承認体外診断用医薬品により評定した物質を使用しています。

【使用上又は取扱い上の注意】

- (1) 本品に使用している抗原は、ヒト由来成分であり、HBs 抗原、HCV 抗体及び HIV-1 抗体及び HIV-2 抗体の検査を行い、陰性の結果を得ておりますが、感染の危険性を完全に否定できる検査法がありません。また、それ以外のウイルスに関する検査はしておりません。感染の危険性があるものとして、検体と同様に取り扱いには十分注意してください。
- (2) 各構成試薬はアジ化ナトリウムを含有していますが、法的には毒物として取り扱われません。アジ化ナトリウムは、鉛、銅などと反応して爆発性の化合物を生成する危険性がありますので、廃棄の際には、大量の水と共に流してください。また、誤って目や口に入ったり皮膚に付着した場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

* 【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法：2～8 に保存

* 有効期間：12 カ月（使用期限は、外箱に表示しています。）

製造販売元

 株式会社 **カインス**

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-18 TEL(03)3816-4485

販売元

シスメックス株式会社

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号 TEL (078)265-0500(代)

TSPS9077