

総蛋白・アルブミン標準血清

製造番号： 000

有効期限： '00.00

注：この使用説明書をよく読んでから使用してください。

1. 製品内容

本製品は、総蛋白、アルブミン及びカルシウム測定用の標準血清です。

2. 試液の調製方法

調製不要ですので、そのまま使用してください。

3. 使用上又は取扱いの注意

1) ヒト血液製剤の取扱い

本製品については、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体が陰性であることを確認しておりますが、現時点ではどのような試験法を用いてもヒト由来の血液製剤により絶対に感染しないという保証をすることは不可能です。従って、患者検体と同様、感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。また、検体や本製品に接触した器具等についても、感染の危険性のあるものとして取扱ってください。

2) アジ化ナトリウムを含有する製剤の取扱い

本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

3) 使用時の取扱い

使用時に十分転倒混和し、均一にしてから使用してください。

4. 貯蔵方法・有効期間

貯蔵方法：2～10℃で冷暗所保存

有効期間：12カ月（有効期限は容器ラベル及び外箱に表示）

5. 表示値

項目	表示値	不確かさ		対照標準物質 (供給機関)
総蛋白	6.4 g/dL	± 0.05 g/dL	± 0.8 %	SRM 927 (NIST)
アルブミン (BCG法)	4.6 g/dL	± 0.11 g/dL	± 2.4 %	ERM-DA470 (IRMM)
アルブミン (BCP法)	4.5 g/dL	± 0.11 g/dL	± 2.5 %	
カルシウム	10.0 mg/dL	± 0.09 mg/dL	± 0.9 %	JCCRM 321 (HECTEF)

6. 包装

管理コード	包装
STS1810	5 mL × 6

製造販売元



株式会社 カイノス

2009.08 改訂 (第3版)

2008.02 改訂 (第2版)

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-18 ☎03(3816)4485

TTS1810