

この使用説明書をよく読んでから使用してください

脂質標準血清

【製造番号】 : 135

【使用期限】 : 2013.08

** 【表示値】

項目	試薬名	表示値	不確かさ		標準物質 (供給機関)
総コレステロール	アクアオート カイノス T-CHO試薬 (酵素法)	228 mg/dL	±1.7 mg/dL	±0.7%	JCCRM 224 (ReCCS)
中性脂肪	アクアオート カイノス TG-II試薬 (酵素法:遊離グリセロール消去法)	235 mg/dL	±2.0 mg/dL	±0.9%	JCCRM 224 (ReCCS)
		228 mg/dL	±2.0 mg/dL	±0.9%	グリセロール

【使用目的】

総コレステロール、中性脂肪測定試薬の標準血清

【試薬の調製方法】

- 1) 本製品に精製水を3 mL加え、緩やかに転倒混和して完全に溶解してください。
- 2) 溶解後は、蓋をしめて2~10℃保存で1週間使用できます。

【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) サンプルカップ等に小分けし、ご使用ください。
- 2) 弊社測定用試薬以外への適用に際しては、試薬の検量線が原点を通り、表示濃度まで直線性があることを確認してください。
- 3) 本製品は原料としてウシ血清が含まれています。ヒト感染性ウイルス等の確認試験を実施していません。検体と同様、感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。
- 4) 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で充分洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。

* 【貯蔵方法】

貯蔵方法 : 2~10℃ 冷暗所保存

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
脂質標準血清	STS2270	3 mL用× 4

【問い合わせ先】

株式会社カイノス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元



株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485