

CRP多点用標準血清

注：この使用説明書をよく読んでから使用して下さい。

1. 製品内容

- 1) 本製品は、CRM470に基づいて設定しています。
- 2) LATECLE CRP試薬の測定用キャリブレーターとしてご使用ください。
- 3) CRP多点用標準血清1～6の表示値は容器ラベルに記載しています。

2. 試薬の調製法

そのまま使用する。

3. 取り扱い上の注意

1) ヒト血液製剤の取り扱い

本製品については、HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体陰性であることが確認されておりますが、現時点ではどのような試験法を用いても人由来の血液製剤により絶対に感染しないという保証をすることは不可能です。従って、患者検体と同様、感染の危険性があるものとして取り扱いには充分注意して下さい。また、検体や本製品に接触した器具等についても、感染の危険性のあるものとして取り扱って下さい。

2) アジ化ナトリウムを含有する製剤の取り扱い

本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。また、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

4. 貯法（有効期間）

2～10℃で遮光保存
1年間有効

5. 包装

| 管理コード | 包装 |
|---------|---------|
| STS9000 | 各2 mL×1 |

製造販売元

 株式会社 **カイノス**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎03(3816)4485