

## NSオートP-FDP用スタンダード

本品はNSオートP-FDPの検量線作成用の標準物質です。

### 【使用法】

本品1バイアルに、P-FDP用希釈液（別売）を正確に1.0mLを加え、10分間静置後、ゆるやかに転倒混和して下さい。

### 【貯法】

2～8℃

### 【使用期限】

外箱に記載してあります。

### 【包装単位】

1mL用×5本

### 【取扱上の注意】

本品は、HBs抗原陰性、HIV抗体（AIDSウイルス抗体）陰性、HCV抗体陰性を確認した血漿から調製されておりますが、ご使用の際には感染の危険のあるものとして、検体と同様に十分ご注意の上お取扱ください。

（製造販売元）

株式会社 ナスカ

神奈川県横浜市青葉区元石川町5421-1