

この使用説明書をよく読んでから使用してください

総蛋白・アルブミン標準血清

【製造番号】 XXX

*【管理コード】 XXXXXX

【使用期限】 XXXX.XX

**	項目	試薬名	表示値	標準物質 (供給機関)
	総蛋白	アクアオート カイノス TP-II 試薬	0.00 g/dL	SRM 927 (NIST)
	アルブミン	アクアオート カイノス ALB試薬 (BCP改良法)	0.00 g/dL	ERM-DA470 (IRMM)

【使用目的】

総蛋白 (TP)、アルブミン (ALB) 測定試薬の標準血清

【試薬の調製方法】

- 1) 調製不要です。
使用時に十分転倒混和し、均一にしてから使用してください。

【操作上の注意】

- 1) サンプルカップ等に小分けしてご使用ください。
- 2) 弊社測定用試薬以外への適用に際しては、試薬の検量線が原点を通り、表示濃度まで直線性があることを確認してください。

**【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) 本製品は原料としてヒト血清が含まれています。HBs抗原、HIV抗体 (HIV-1、HIV-2)、HTLV-1抗体及びHCV抗体が陰性であることを確認しております。しかし、現時点ではどのような試験法を用いてもヒト感染ウイルスの存在を否定することは不可能です。従って、検体と同様、感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。
- 2) 使用にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 3) 感染を避けるため、口によるピペッティングを行わないでください。
- 4) 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- 5) 本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。
- 6) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- 7) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121°C、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- 8) 本製品が漏出又は飛散した場合、感染の危険があるものとして消毒処理又は滅菌処理を行ってください。
- 9) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

【保管方法・有効期間】

保管方法 : 2~10°C 冷暗所保存

有効期間 : 12ヵ月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
総蛋白・アルブミン標準血清	CS-1810	5 mL × 2
	STS1810	5 mL × 6


【問い合わせ先】

株式会社カイノス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元


株式会社カイノス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485