

BIL標準品

1. 製品内容

本製品は、ジタウロピリルピンを使用した「アクアオート カイノス T-BIL試薬」及び「アクアオート カイノス D-BIL試薬」用の標準液です。

濃度は、容器ラベルに表示しています。製造ロットごとに異なりますので、ご確認ください。

2. 調製法

本品1バイアルに精製水2 mLを加え、緩やかに転倒混和し、完全に溶解してください。

溶解後は密栓状態にて遮光保存するとき、冷蔵保存（2～10℃）で2日間、小分け凍結保存で1週間安定です。


3. 貯法（有効期間）

2～10℃で遮光保存

1年間有効

4. 包装

管理コード	包装
STS2500	2 mL用×4

 株式会社 カイノス