

この使用説明書をよく読んでから使用してください

CRP多点用標準血清

【使用目的】

LATECLE CRP試薬の検量用標準血清

【特徴】

- 1) 本製品はCRM470に基づいて設定しています。
- 2) 各標準血清の表示値は容器ラベルに記載しています。

【試薬の調製方法】

- 1) そのまま使用してください。

** 【操作上の注意】

- 1) サンプルカップ等に小分けしてご使用ください。

** 【使用上又は取扱い上の注意】

- 1) 本製品は原料としてヒト由来成分が含まれています。HBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体が陰性であることを確認しております。しかし、現時点ではどのような試験法を用いてもヒト感染ウイルスの存在を否定することは不可能です。従って、検体と同様、感染の危険性があるものとして取扱いには十分注意してください。

- 2) 本製品にはアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- 3) 検体に接触した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険があるものとして処理してください。
- 4) 使用にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用してください。
- 5) 感染を避けるため、口によるピペッティングを行わないでください。
- 6) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。
- 7) 検査に使用した器具や試薬等は感染の危険があるものとして適切に処理してください。次亜塩素酸ナトリウム (0.1%以上、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) による消毒処理又はオートクレーブ (121°C、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- 8) 本製品が漏出又は飛散した場合、感染の危険があるものとして消毒処理又は滅菌処理を行ってください。
- 9) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

** 【保管方法・有効期間】

保管方法：2～10°C

有効期間：1年 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

TTS9000 (3A755)

** 2017年12月改訂 (第3版)

* 2005年4月改訂 (第2版)

【包装単位】

製品名	管理コード	包装
CRP多点用標準血清	STS9000	各2 mL×1 (6濃度)


【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

*【製造販売元】

 株式会社 **カインス**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485