

この使用説明書をよく読んでから使用してください

医薬用外毒物

## DG 洗浄液 A

## DG 洗浄液 B

(機器ライン洗浄試薬)

## 【全般的な注意】

- 1) 使用説明書に記載以外の使用方法については保証を致しません。
- 2) 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 3) 本製品は毒物 (アジ化ナトリウム含有) に指定されています。安全データシート (SDS) を確認のうえ、関係法令に従った取扱いを行ってください。

## \*\* 【形状・構造等 (キットの構成)】

- 1) DG 洗浄液 A : (DG Fluid A)  
緩衝液 (主成分:生理食塩液)  
アジ化ナトリウム 1.6%
- 2) DG 洗浄液 B : (DG Fluid B)  
緩衝液 (主成分:界面活性剤)  
アジ化ナトリウム 1.6%

## 【使用目的】

機器のライン洗浄 (全自動輸血検査装置WADiana Compact、全自動輸血検査装置Erytra 用)

## \*\* 【用法・用量 (操作法)】

1. 試薬の調製方法  
蒸留水を用いて、各洗浄液 125 mLを2 Lに16倍希釈してください。  
調製後の試薬は室温で保存した場合、4週間安定です。
2. 操作方法  
機器の取扱説明書を参照してください。

## \*\* 【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意
  - 1) 本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されています。誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
2. 使用上の注意
  - 1) 容器が破損や劣化している場合、内容物が漏出している場合は使用しないでください。
  - 2) ラベルに記載されている使用期限内に使用してください。
  - 3) 使用期限内に試薬の色が薄くなる可能性があります、性能には影響ありません。

## 3. 廃棄上の注意

- 1) 本製品を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の関連法規に従って処理してください。
- 2) 本製品が漏出又は飛散した場合、少量の時は吸水紙等で拭き取り、大量の時は水で洗い流してください。
- 3) 本製品には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含有されています。アジ化ナトリウムは鉛、銅等と反応して爆発性の高いアジ化金属を形成することがあるので、廃液等は大量の水で流すよう注意してください。
- 4) 本製品の容器等は他の目的に転用しないでください。

## 4. その他の注意

- 1) 本製品には、化学物質排出管理促進法で規制される第一種指定化学物質が含有されています。化学物質の名称、含有量等の詳細については、本製品の安全データシート (SDS) をご参照ください。なお、SDSは問い合わせ先までご請求ください。

## \* 【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法 : 2~25℃

有効期間 : 24ヵ月 (使用期限は容器ラベル及び外箱に表示)

## 【包装単位】

製品名	管理コード	包装
DG 洗浄液 A	DGC3679	125 mL×12
DG 洗浄液 B	DGC3678	125 mL×12

## \*\* 【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18

☎ 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

製造販売元



株式会社 カインス

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-18 ☎ 03 (3816) 4485