

この使用説明書をよく読んでから使用してください

DG 洗浄液 A

DG 洗浄液 B

(全自動輸血検査装置のライン洗浄試薬)

【使用目的】

本製品は DG Gel カード専用全自動輸血検査装置の流路系洗浄に使用します。使用前に希釈が必要です。

【試薬】

1. DG 洗浄液 A : (DG Fluid A) 125 mL ×12
緩衝液 (主成分: 生理食塩液)
2. DG 洗浄液 B : (DG Fluid B) 125 mL ×12
緩衝液 (主成分: 界面活性剤)

【安定性】

1. 本製品は2～25℃で保存した場合、ラベルに記載された使用期限まで安定です。
2. 調製後の試薬は室温 (18～25℃) で保存した場合、1か月間安定です。
3. 使用期限までに試薬の色が薄くなる可能性があります。性能に影響はありません。

【操作方法】

1. 精製水を用いて、各洗浄液125 mL (容器1本) を16倍希釈し、2Lにしてください。
2. 希釈した各洗浄液は、DG Gelカード専用全自動輸血検査装置に付属されているコンテナに充填します。

【使用上の注意】

1. 使用後は自治体の規則に従って廃棄してください。
2. 使用期限を超えて使用しないでください。

【問い合わせ先】

株式会社カインス 学術部
〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目 38 番 18 号
TEL 03 (3816) 4480 FAX 03 (3816) 6544

【製造販売元】



株式会社 **カインス**

〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目 38 番 18 号
TEL 03 (3816) 4485